

strack



Bedienungsanleitung
D`emploi
instruzione
instructions for use
Strackair

Lesen Sie die Bedienungsanleitung ganz durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise auf der Seite 32.

Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitsregeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstossen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Die Sicherheitshinweise werden durch ein Signalwort gekennzeichnet: «ACHTUNG».

Wichtiger Hinweis	3
Sicherheitshinweis	4
Inhaltsverzeichnis	5
Herzlichen Glückwunsch	6
Anwendungsbereiche	7
Kurzanleitung	10
Erste Inbetriebnahme	13
Darstellung der Elektro-Luftanschlüsse	14
Bedienelemente und Bedienung.....	15
Automatischer Kreislauf	17
Individueller Kreislauf	18
Auswahl der Körperzonen	19
Individuelle Behandlung der Körperzonen	20
Spezialfunktion, Auswahl der Körperzonen	21
Optionen	22
Fragen zur Anwendung	23
Fehlerbehandlung	24
Anwendungsbeispiele	25
Pflege und Aufbewahrung.....	27
Technische Daten	28
Produkt Wertstoffe	28
Garantiebedingungen	29
Reparatur, Garantie	31
Wichtige Sicherheitshinweise	32

Herzlichen Glückwunsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres **Strackair**. Sie haben damit ein sehr leistungsfähiges Gerät erworben, das im kosmetischen wie auch im medizinischen Bereich hervorragende Ergebnisse erzielen kann.

Strackair ist ein pneumatisches Wechseldruckgerät. Sein Wirkungsprinzip basiert auf der Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) in einem Ein- und Mehrkammerluftsystem. Diese Wechselwirkung von Druck und Entspannung verbessert die Zirkulation und steigert die Drainage des Lymphsystems. Die Steuerung dieser Vorgänge übernimmt die form-schöne, elektronische Steuereinheit. Sie brauchen lediglich das gewünschte Programm auszuwählen.

Das breite Einsatzspektrum von **Strackair** reicht von der Verbesserung der Gewebestruktur für schönere Beine, über die Linderung von «müden», belasteten Beinen, bis hin zur Thromboseprophylaxe oder Therapie von venösen und lymphatischen Erkrankungen. In letzteren Fällen besprechen Sie die Anwendung bitte vorab mit Ihrem Arzt.

Als Option sind auch Manschetten zur Behandlung der Arme erhältlich. Wirksamkeit und Stellenwert von AIK sind vielfach nachgewiesen und dokumentiert. Deshalb sind wir überzeugt, dass Sie mit **Strackair** Erfolg haben werden.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung von **Strackair** die Bedienungsanleitung durch und vergewissern Sie sich, dass Sie den Inhalt verstanden haben.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem **Strackair**.

Anwendungsbereiche

Wellnessair

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden ohne Anstrengung. Lindern Sie mit **Strackair** «müde», schmerzende Beine, die durch langes Stehen oder Sitzen, besonders auch nach Langstreckenflügen, belastet sind.

Beautyair

Schöne Beine dank **Strackair**. Die Massagewirkung regt den Kreislauf an und entstaut Ihre Beine. Die prophylaktische Behandlung von Zellulitis kann unterstützt werden.

Therapyair

Beugen Sie Erkrankungen vor. Das Wirkungsprinzip macht **Strackair** zum idealen Gerät für die vorbeugende Behandlung gegen Stauungen und ernsthafte Venenerkrankungen. Die Anwendung ist besonders auch bei Personen angezeigt, welche durch Unfall oder Krankheit in der Bewegung eingeschränkt sind. (z.B. Paraplegiker, Tetraplegiker, Hemiplegiker, MS-Patienten). Konsultieren Sie bei medizinischer Indikation vorgängig Ihren Arzt.

Medicalair

Regenerieren Sie postoperativ mit **Strackair**. Nach Unfall, Krankheit oder Schwangerschaft leistet **Strackair** einen wertvollen Beitrag zur Regeneration. Konsultieren Sie bei medizinischer Indikation vorgängig Ihren Arzt.

Anwendungsbereiche

Indikationen

- Thromboseprophylaxe
- venös bedingte Ödeme
- posttraumatische Ödeme
- Ulcus cruris venosum
- Stauungszustände infolge Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- primäre Lymphödeme zusätzlich zur komplexen physikalischen Entstauungstherapie
- sekundäre Lymphödeme ohne proximale Sperre (zusätzlich zur komplexen physikalischen Entstauungstherapie)
- Lipödeme
- Dependency-Syndrom
- arterielle Verschlusskrankheit mit Ödem (unter strenger Kontrolle)
- Sportverletzungen
- Muskelkater und Prellungen
- Verstauchungen und Blutergüsse
- Besenreiser
- einfache venöse Stauung
- Schwellungen und Schweregefühl

Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen

- frischer Myokardinfarkt
- dekompensierte Herzinsuffizienz
- Lungenödem
- kardial und renal bedingte Ödeme
- Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht
- Erysipel
- malignes Lymphödem
- Unterschenkeltrauma
- implantierte Schrittmacher jeglicher Art
- Einsatz elektrischer Lebenserhaltungsmaschinen, z.B. Herz-Lungenmaschine
- Einsatz elektrischer, medizinischer Geräte, z.B. Elektrokardiograph

Relative Kontraindikationen

- Tumoren im proximalen Abflussbereich
- Medikamentöse Behandlung (beinhaltet auch medizinische Salben und Cremes)
- Schmerzen während der Anwendung des Gerätes

Risiken

- Zunahme des Ödems proximal der Manschette bei zentral gelegenen Lymphabflussstörungen
- zu hohe Drücke können Hautnekrosen verursachen

Bei untenstehenden Punkten ist vor der Anwendung des Gerätes der Arzt zu konsultieren:

- akute Krankheit
- maligner Tumor
- schwaches Herz
- Fieber über 38°C
- Anämie
- Kopferkrankungen, Bauch- oder Hauterkrankungen
- empfindliche Haut
- hoher Blutdruck (über 180mmhg)
- in ärztlicher Behandlung
- leichte Infizierbarkeit
- Menstruation oder Schwangerschaft
- andere nicht normale Verfassung

Kurzanleitung

Die folgende Kurzanleitung zeigt Ihnen in 6 Schritten, wie Sie schnell eine erste Anwendung an beiden Beinen vornehmen können.

1. Geeignete Kleidung

- Tragen Sie anliegende, weiche Kleidung. Bei privater Anwendung können Sie auch auf eine Hautbedeckung verzichten. Falls Sie das Gerät medizinisch anwenden (nur nach Absprache mit Ihrem Arzt) und offenen Beine haben, schützen Sie mit geeigneten Hilfsmitteln die Wunden. Falls Sie Strümpfe tragen, achten Sie darauf, dass sich der Velcro-Verschluss nicht im Strumpfgewebe verfängt.

2. Netzanschluss

- Schliessen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

3. Körperposition

- Setzen Sie sich am idealsten auf eine bequeme Unterlage, stützen Sie Ihren Rücken mit einem Kissen und winkeln Sie die Beine leicht an. Sie können die Anwendung jedoch auch im Sitzen oder Liegen ausführen.

4. Manschetten anziehen

- Ziehen Sie die Luftmanschetten an. Das Produkt-Logo zeigt dabei nach aussen. Die Manschetten sollen nur anliegen und nicht straff angezogen sein, damit auch eine Entlastung stattfinden kann.
- Befestigen Sie die Manschetten mit dem Velcro-Verschluss. Falls Sie Strümpfe tragen, achten Sie darauf, dass sich der Velcro-Verschluss nicht im Strumpfgewebe verfängt.
- Beachten Sie, dass eine Schlauchgruppe (blau, orange, weiss) jeweils derselben Körperseite zugeordnet ist.

5. Luftschlauch-Verbindungen

- Verbinden Sie nun die Schläuche entsprechend ihrer Farbcodierung mit den Manschetten und schliessen Sie das Netzteil an die Steuereinheit an.

6. Behandlung starten

- Drehregler «Druckluftsteuerung» auf «schwach» (5 sec) stellen. Beginnen Sie mit minimalem Druck, indem Sie den orangefarbenen Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn ganz nach links drehen. Nach dem ersten Durchlauf erhöhen Sie den Druck soweit, bis Sie die Kompression noch als angenehm empfinden.
- «On/Off»-Taste drücken, um das Gerät einzuschalten. Die Dekompressionszeit wird automatisch auf 2 sec eingestellt. Lehnen Sie sich bequem zurück, entspannen Sie sich und geniessen Sie die Behandlung.

Weitere Steuerung

Behandlung bestimmter Körperzonen

Taste «Körperzone» antippen, bis gewünschte Körperzone durch Aufleuchten gekennzeichnet ist.

Automatischen Kreislauf während der Anwendung des Gerätes anwählen

Taste «Automatischer Kreislauf» während 2 Sekunden gedrückt halten.

Dekompressionszeit verlängern

Taste «Zeiteinstellung» drücken. Dekompressionszeit wird stufenweise verlängert: 2 sec, 5 sec, 10 sec. Gewählte Dekompressionszeit wird durch entsprechendes Leuchtelement angezeigt. Je kürzer die Dekompressionszeit, umso stärker die Kompression (anregende Wirkung). Längere Dekompressionszeit erzielt entspannende Wirkung.

Druckluftsteuerung:

Drehregler «Druckluftsteuerung» betätigen. Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Druckaufbau. Die Druckluftsteuerung reguliert in einem Bereich von 5 bis 80 Sekunden. Für die erste Anwendung sollte die Druckluftsteuerung unter 15 Sekunden eingestellt werden.

Geniessen Sie die Behandlung:

Der automatische Kreislauf lässt die Luft in Wellen um das gesamte Bein zirkulieren. Entspannen Sie sich während Kompression und Dekompression sich abwechseln.

Ende der Behandlung:

Das Gerät stoppt automatisch nach Durchlauf des Programmes.

Um die Behandlung sofort abubrechen, drücken Sie die «On/Off»-Taste. Das Gerät schaltet sofort aus und der Druck in den Manschetten baut sich ab.

Vergewissern Sie sich, dass der Lieferumfang vollständig ist.


Entfernen Sie die Vinyltaschen, mit denen die Produktteile geschützt sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sowie Indikation und Kontraindikation und vergewissern Sie sich, dass Sie diese Informationen verstanden haben.

Falls Sie Strackair therapeutisch oder medizinisch anwenden oder bezüglich der Anwendung unsicher sind, konsultieren Sie vor der ersten Anwendung

Ihren Arzt. Ihr Arzt kann Sie medizinisch begleiten, damit Sie beste Erfolge erzielen.



Auf den folgenden Seiten sind alle Funktionen für eine erfolgreiche Anwendung und Handhabung beschrieben. Wir wünschen Ihnen viel Spass und gute Gesundheit.

- Blau entspricht Fuss
- Orange entspricht Wade
- Weiss entspricht Oberschenkel/Hüfte/Knie/Arm

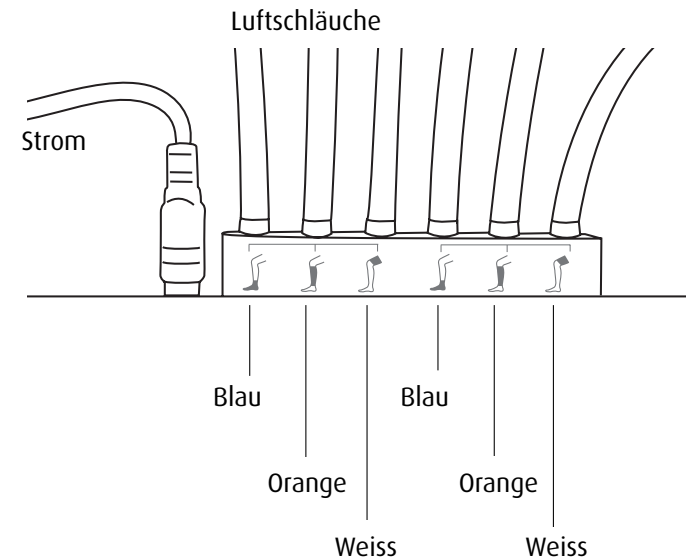

Darstellung der Elektro-Luftanschlüsse

Bedienelemente und Bedienung

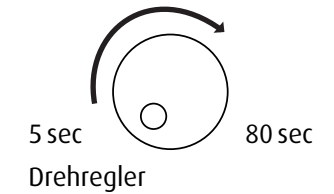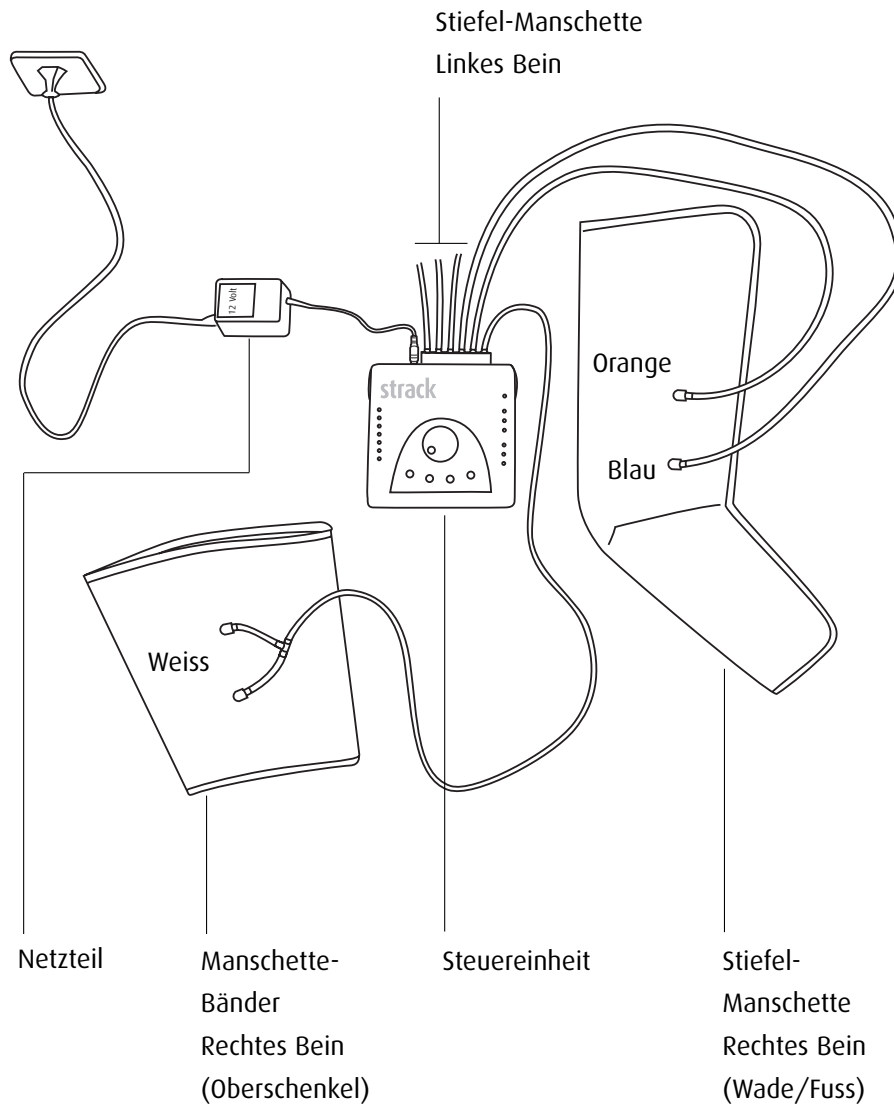

Druckluftstärke regeln

Mit dem Drehregler «Druckluftsteuerung» wird die Kompressionszeit und somit die Druckluftstärke eingestellt. Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Kompressionszeit in einem Regelbereich von 5 bis 80 Sekunden. Jede länger die Zeit, umso höher ist der aufgebaute Druck.

ACHTUNG

Bei einer Kompressionszeit von mehr als 40 sec ist der Druck sehr hoch und könnte zu Hautnekrosen führen.

Stellen Sie den Drehregler «Druckluftsteuerung» auf Position «schwach» (5 sec). Beginnen Sie mit minimalem Druck, indem Sie den orangefarbenen Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn ganz nach links drehen. Nach dem ersten Durchlauf erhöhen Sie den Druck soweit, bis Sie die Kompression noch als angenehm empfinden.

Für die erste Anwendung sollte die Druckluftsteuerung unter 15 Sekunden eingestellt werden.

1 on/off **Einschalten / ausschalten**

Mit der Taste «On/Off» wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Das entsprechende Leuchtelement zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist und dass die Druckluftsteuerung auf «schwach» (5 sec) eingestellt ist.

2 ⌚ **Behandlungsdauer einstellen**

Mit der Taste «Behandlungsdauer» wird die Dauer der Behandlung eingestellt. Die Regelung erfolgt in Stufen: 5 min, 10 min, 15 min.


3 ↻ **Dekompressionszeit einstellen**

Mit der Taste «Dekompressionszeit» wird die Dekompressionszeit stufenweise umgeschaltet: 2 sec, 5 sec, 10 sec. Die gewählte Einstellung wird jeweils durch das entsprechende Leuchtelement angezeigt.

Je länger die Dekompressionszeit, umso kürzer ist die Kompressionsphase. Eine kürzere Dekompression führt zu einer längeren Kompressionsphase und somit zum Aufbau von höherem Druck.

Körperzone anwählen

Mit der Taste «Körperzone» wird die zu behandelnde Körperzone angewählt. Mehrmaliges Drücken der Taste schaltet zwischen den verschiedenen Zonen um. Siehe dazu «Auswahl der Körperzonen» auf Seite 19.

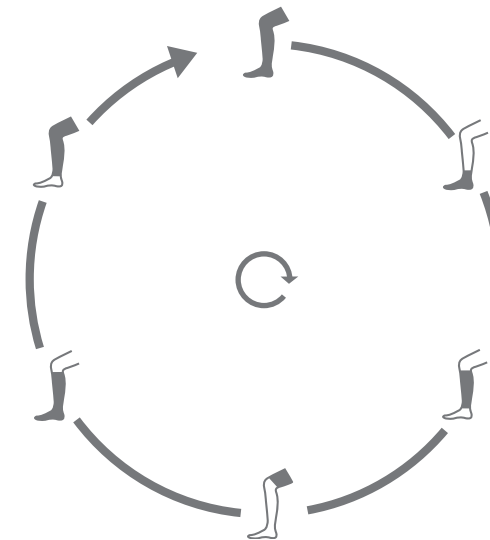

Der automatische Kreislauf lässt die Luft in Wellen um das gesamte Bein zirkulieren, womit ein entspannender Massageeffekt erzielt wird. Dieser kann vor allem zur Entspannung von belasteten Beinen genutzt werden.

- Drücken der Taste «On/Off» aktiviert den automatischen Kreislauf.
- Drehregler «Druckluftsteuerung» betätigen, um die Kompressionszeit und die Druckluftstärke einzustellen.
- Gerät stoppt automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.



Der individuelle Kreislauf verhält sich vom Wirkprinzip gleich wie der automatische Kreislauf. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass nur die gewählte Körperzone therapiert wird.

- Drücken der Taste «On/Off» aktiviert den automatischen Kreislauf.
- Taste «Körperzone» antippen, bis die gewünschte Körperzone durch das Leuchtelement angezeigt wird.

- Drehregler «Druckluftsteuerung» betätigen, um die Kompressionszeit und die Druckluftstärke einzustellen.
- Gerät stoppt automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.

Beispiel:

Wade mit Fuss

Diese Behandlung von Waden und Füßen eignet sich besonders für Personen im Rollstuhl. Sie kann jedoch auch von Menschen ohne Behinderung angewendet werden.

- Ziehen Sie die Manschetten-Stiefel an und schliessen Sie den Velcro-Verschluss.
- Schliessen Sie die Luftschläuche an die Steuereinheit und die Manschetten-Stiefel an.

4



Die Taste «Körperzone»

Das Drücken der Taste «Körperzone» schaltet zwischen den behandelten Körperzonen um.



Fuss mit Knöchel

Zur Behandlung von Füßen und Knöcheln. Benützen Sie die Stiefel-Manschetten.



Wade

Zur Behandlung der Waden. Benützen Sie die Stiefel-Manschetten.



Oberschenkel

Zur Behandlung der Oberschenkel. Benützen Sie die Manschetten-Bänder.



Wade mit Fuss

Zur Behandlung von Waden und Füßen. Benützen Sie die Stiefel-Manschetten.




Wade mit Oberschenkel

Zur Behandlung von Waden und Oberschenkeln. Benützen Sie die Stiefel-Manschetten und die Manschetten-Bänder.



Ganzes Bein

Zur Behandlung von Füßen, Knöcheln, Waden und Oberschenkeln. Benützen Sie die Stiefel-Manschetten und die Manschetten-Bänder.

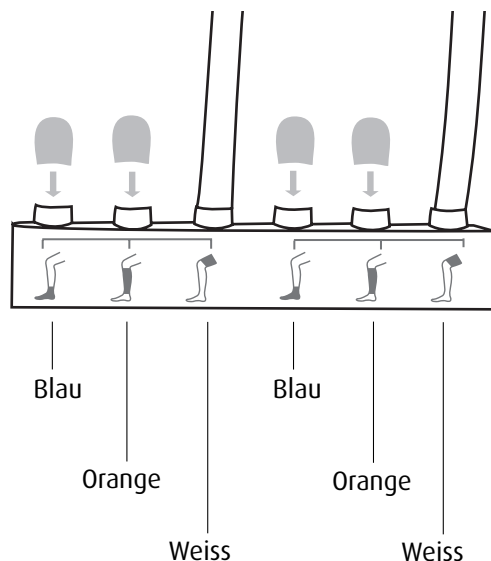

Um die individuelle Behandlung einzelner Körperzonen einzurichten, ohne alle Behandlungsteile anziehen zu müssen, können nicht benötigte Luftschläuche weggelassen werden. Auf die freibleibenden Steckplätze an der

Steuereinheit werden Verschlusskappen aufgesteckt. Sie brauchen nur die gewünschten Manschetten anzuziehen.

4 ☉

Die Taste «Spezialfunktion»

Nachstehende Behandlungsmethoden sind in der Regel therapeutisch oder medizinisch angezeigt. Sie eignen sich besonders nach Operationen, für Menschen mit Behinderung oder für kosmetische Anwendungen. Ausser der Behandlung der Arme, können alle Funktionen mit dem Standard-Zubehör durchgeführt werden. Das Drücken der Taste «Spezialfunktion» schaltet zwischen den behandelten Körperzonen um, die in der Spezialfunktion enthalten sind.



Knie

Die Knie werden einzeln behandelt.

- Wickeln Sie die Manschettenbänder um je ein Knie und schliessen Sie den Velcro-Verschluss.
- Schliessen Sie die Luftschläuche an die Steuereinheit und die Manschettenbänder an.

Arme

Für die Behandlung der Arme werden die speziellen Arm-Manschetten verwendet.

Hüfte

Um eine Manschette für die Hüften zu bilden, werden die beiden Manschetten-Bänder mit den Velcro-Verschlüssen fächerförmig zu einer Manschette zusammengefügt.

- Verbinden Sie die Manschettenbänder mit den Velcro-Verschlüssen.
- Wickeln Sie die Manschettenbänder um die Hüften und schliessen Sie den Velcro-Verschluss.
- Schliessen Sie die Luftschläuche an die Steuereinheit und die Manschettenbänder an.

ACHTUNG


Wickeln Sie die Manschette nicht um den Bauch! Die inneren Organe könnten durch den starken Druck geschädigt werden.

Option Spezialfunktion

Bestell-Nr. BH106M

Als zusätzliche Option ist die Spezialfunktion erhältlich. Diese ermöglicht die flexiblere Behandlung zusätzlicher Körperzonen. Im Lieferumfang enthalten sind:

- bereits verschlossene Steckplätze für die Luftschläuche der Spezialfunktion
- zusätzliche Arm-Manschetten

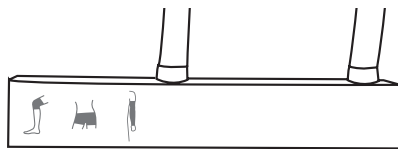

Option Manschetten

Als Option sind weitere Manschetten erhältlich:

- Stiefel-Manschetten, Grösse 2.
Bestell-Nr. BH102



- Manschetten-Bänder, Grösse 2.
Bestell-Nr. BH104



- Arm-Manschette (als Teil der Option «Spezialfunktion»)
Bestell-Nr. BH106



F1. Wann ist die Anwendung von Strackair am wirksamsten?

A. Grundsätzlich kann Strackair jederzeit angewendet werden. Wir empfehlen jedoch die Anwendung besonders nach der Arbeit, beziehungsweise nach langem Stehen oder Sitzen und nach sportlicher Aktivität. Sie können die Wirkung positiv unterstützen, wenn Sie Strackair vor der Nachtruhe anwenden.

F2. Kann Strackair mehrmals am Tag angewendet werden?

A. Die Standard-Anwendung ist 1 bis 2 Mal täglich. Kontinuierliche Anwendung kann zu Nebenwirkungen führen. Wenn Sie Strackair mehr als 1 Mal am Tag anwenden, legen Sie die Anwendungszeiten auf den Morgen und den Abend.

Wenn Sie Strackair therapeutisch oder medizinisch anwenden, können Sie nach Absprache mit Ihrem Arzt die Therapiezeit durch erneutes Einschalten entsprechend verlängern.

F3. Wieviel Druck wird empfohlen?

A. Das ist abhängig von der Person. Wir empfehlen, die Anwendung auf der kleinsten Stufe zu beginnen.

F4. Kann Strackair auch an anderen Körperteilen angewendet werden?

A. Strackair ist ausschliesslich für die Anwendung an den Extremitäten entworfen. Benutzen Sie es nicht für andere Teile des Körpers.

F5. Kann Strackair während der Menstruation oder einer Schwangerschaft angewendet werden?

A. Die Blutzirkulation und der Stoffwechsel werden rapide gesteigert. Sprechen Sie vor der Anwendung von Strackair unbedingt mit Ihrem Arzt.

Fehler

Es strömt keine Luft in die Kammern.
Kein Druckaufbau.

Steuereinheit funktioniert nicht.

Kontrollieren

- Ist der Luftschlauch fest verbunden?
- Steht ein schwerer Gegenstand auf dem Luftschlauch oder ist er geknickt?
- Sind der Schlauch oder die Manschetten beschädigt?
- Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?
- Ist die Taste «On/Off» betätigt?
- Ist das Adapterkabel richtig angeschlossen?

Falls die aufgeführten Kontrollen das Problem nicht beheben, brechen Sie die Anwendung sofort ab und kontaktieren Sie den Strack Kundendienst.

Rhythmisch

(kurzes Füllen und Leeren)

Anwendung für rhythmische Massage. Wirkung ähnlich einem sanften Reiben. Es werden ca. 128 Bewegungen ausgeführt.

- Mit der Taste «Behandlungsdauer» die Behandlungsdauer auf 15 min einstellen.
- Mit dem Drehregler «Druckluftsteuerung» die Kompressionszeit auf 15 sec einstellen.
- Mit der Taste «Dekompressionszeit» die Dekompressionszeit auf 2 sec einstellen.

Entspannend

(mittleres Füllen und Leeren)

Entspannende Wirkung. Es werden ca. 36 Bewegungen ausgeführt.

- Mit der Taste «Behandlungsdauer» die Behandlungsdauer auf 15 min einstellen.
- Mit dem Drehregler «Druckluftsteuerung» die Kompressionszeit auf 20 sec einstellen.

- Mit der Taste «Dekompressionszeit» die Dekompressionszeit auf 5 sec einstellen.

Beruhigend

(langes Füllen und Leeren)

Beruhigende Wirkung, ähnlich Reiben und Drücken. Anwendung bei Erschlafung oder Wasseransammlung im Gewebe. Es werden ca. 18 Bewegungen ausgeführt.

- Mit der Taste «Behandlungsdauer» die Behandlungsdauer auf 15 min einstellen.
- Mit dem Drehregler «Druckluftsteuerung» die Kompressionszeit auf 30 sec einstellen.
- Mit der Taste «Dekompressionszeit» die Dekompressionszeit auf 10 sec einstellen.

Eine Kompressionszeit von über 40 Sekunden ist sehr stark. Versuchen Sie es deshalb erst mit einer Kompressionszeit von 30 Sekunden. Wenn die Kompression bei 30 Sekunden zu stark ist, verkürzen Sie die Kompressionszeit.

Behandlung von Zellulitis

Zellulitis ist eine Bezeichnung für eine nichtentzündliche, konstitutionell bedingte, umschriebene Degeneration der kollagenen und elastischen Fasern des subkutanen Bindegewebes, die besonders bei jüngeren Frauen in den Oberschenkel- und Glutäalregionen auftritt.

Die Zellulitis lässt sich nur prophylaktisch behandeln. Strackair kann Ihnen dabei helfen den Stoffwechsel zu fördern. Achten Sie dabei auf gesunde Gewichtsreduktion und ausreichendes körperliches Training.

Reinigung

Schweissrückstände oder Schmutz können mit einem weichen, feuchten Lappen entfernt werden.

Hartnäckiger Schmutz kann mit einem feuchten Lappen und mildem Haushaltsreiniger entfernt werden. Danach mit weichem Lappen trockenreiben.

Für die Reinigung nicht zu verwenden sind: Verdünner, Benzol, Alkohol, Lösungsmittel oder Chemikalien.

Aufbewahrung

Verstauen Sie Strackair nach Gebrauch wieder sachgerecht:

- Adapterkabel von der Anschlussbuchse an der Steuereinheit abziehen.
- Netzstecker abziehen.
- Stromkabel aufwickeln und mit Kabelbinder fixieren (Kabel nicht verknoten).
- Luftschläuche von den Steckplätzen an der Steuereinheit abziehen und von den Anschlüssen an den Luftmanschetten. Ergreifen Sie dazu den Luftschlauch jeweils nahe

seinem Ende und unterstützen das Abziehen mit einer leichten Drehung.

- Luftschläuche aufrollen. Achten Sie darauf, die Luftschläuche nicht zu knicken oder zu verschmutzen.
- Manschetten falten und in die Tasche legen.
- Geräteteile in der Gerätebox verstauen und diese unter Beachtung untenstehender Hinweise lagern.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Aufbewahrung:

- Nicht an Orten mit extremer (hoher/niedriger) Temperatur lagern, oder bei hoher Luftfeuchtigkeit und Staubeinwirkung.
- Gerät keinen plötzlichen Temperaturschwankungen oder Schlägen aussetzen. Dies kann zu Form- oder Farbänderungen sowie Rissen führen.
- Manschetten vor Einstichen geschützt lagern.
- Gerät ausserhalb Kinderreichweite lagern.

Technische Daten

Modell	MK-203
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Leistung	17 Watt
Druck ca.	120 mm/Hg
Gewicht	2.5 kg

Certificate Nr. 03-KOR-MDD-0102
Air Massager (Strack Air)

Produkt-Wertstoffe

Steuereinheit: Gehäuse aus Kunststoff ABS; Pumpe, Ventile, Elektronische Komponenten.

Manschette: Kunststoff Urethan

Schläuche: Kunststoff Silikon

Netzteil: Kupfer, Stahlblech, Elektronische Komponenten

Verpackung: Karton, Kunststoff PET

Entsorgung

Das Gerät kann an offiziellen Sammelstellen für elektronische Geräte abgegeben werden.

Garantiebedingungen

Strack AG stellt diese Garantiebedingungen für dieses Air-Massagegerät und jegliches mit dem Air-Massagegerät gelieferte Originalzubehör (insgesamt das «Produkt») bereit. Um die Funktionen Ihres neuen Produkts voll auszuschöpfen, empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden einfachen Schritte zu beachten. Lesen Sie die Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz. Lesen Sie alle Garantiebedingungen von Strack AG. Bewahren Sie Ihre Originalquittung auf. Diese benötigen Sie für eventuelle Reparatur-Garantieansprüche. Wenn Sie für Ihr Strack Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse <http://www.Strack.ch>

GARANTIE

Nach Massgabe dieser Bedingungen garantiert Strack AG, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und zwei (2) Jahre danach frei von Material- und Fertigungsfehlern ist.

GARANTIEFÄLLE

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäsem Einsatz und Service irgendeine Material- oder Fertigungsfehler zeigt, wird eine

Niederlassung, ein Vertragshändler oder ein Service Partner von Strack AG das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach ihrem bzw. seinem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

BEDINGUNGEN

1. Diese Garantie gilt nur, wenn der vom Verkäufer für den Käufer ausgestellte Garantieschein vorgelegt wird, auf dem sowohl die Seriennummer als auch das Kaufdatum des zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkts vermerkt sind. Strack AG behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.

2. Wenn Strack AG das Produkt repariert oder Ersatz leistet, dann gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instandgesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Baugruppen werden Eigentum von Strack AG.

3. Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiss, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschliess-

Garantiebedingungen

lich, aber nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anweisungen von Strack AG bezüglich Einsatz und Wartung. Diese Garantie gilt ebenfalls nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen, Veränderungen und Anpassungen, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Modifikationen, Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch Personen verursacht werden, die nicht von Strack AG autorisiert wurden.

5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Strack Originalzubehör handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.

6. Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.

7. ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN BEGRENZTEN GARANTIE. SÄMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER

EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

STRACK AG IST, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL ERSATZPFLICHTIG. FÜR SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH – OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – ENTGANGENER GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer impliziter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte im Rahmen der anwendbaren Gesetze, noch die Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

Reparatur, Garantie

Bei allfälliger Störung oder einem Gerätedefekt senden Sie das Gerät an Ihren Händler. Liegt ein Garantieanspruch vor, wird das Gerät nach unserem Ermessen repariert oder ersetzt. Luftmanschetten können nicht repariert werden.

Beschädigte Manschetten können gegen Verrechnung nachbestellt werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemässe Verwendung

Strackair darf nur zur Entstaubung an den Extremitäten benutzt werden.

Strackair darf nicht an anderen Körperteilen als den Extremitäten angewendet werden. Konsultieren Sie bei medizinischer Indikation vorgängig Ihren Arzt.

Sicherheitshinweise

Strackair ist ein betriebssicheres Gerät, das ausgiebig auf seine Funktion und Sicherheit hin getestet wurde.

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung unterstützen den sicheren und sachgerechten Betrieb des Gerätes. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und folgen Sie in jedem Fall den darin enthaltenen Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Sicherheitshinweise werden durch ein Signalwort gekennzeichnet: «ACHTUNG».

Generelle Sicherheitshinweise zur Verwendung von Strackair

ACHTUNG

- Beachten Sie unbedingt die Kontraindikationen.
- Beim Auftreten von Problemen jeglicher Art ist die Benutzung des Gerätes sofort abbrechen.
- Das Gerät darf nur von und an Personen benutzt werden, welche sich klar verständigen können.
- Die Luftmanschetten dürfen nur in angelegtem und mit verschlossenem Velcro-Verschluss befüllt werden.
- Das Netzteil nur an Wechselstrom mit Netzspannung gemäss Typenschild anschliessen. Verwenden Sie ausschliesslich das im Lieferumfang des Gerätes enthaltene Netzteil (DG-1210C).
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bei Betriebsstörungen und vor jeder Reinigung immer Netzstecker ziehen. Niemals am Netzkabel ziehen.

- Nehmen Sie das Gerät nicht im Freien in Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser. Setzen Sie es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder während dem Duschen.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser fallen, nehmen Sie es erst dann heraus, wenn der Netzstecker gezogen ist. Danach nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern zuerst durch den Strack Kundendienst überprüfen lassen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht währenddem Sie ein Fortbewegungsmittel lenken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Einfluss hoher Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf heisse Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es ebenfalls nicht mit heissen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Verwenden Sie für die Aufbewahrung des Netzkabels den dafür vorgesehenen Kabelbinder.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch den Strack Kundendienst ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemässe Verlängerungskabel, und lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht.
- Elektrogeräte sind ausser Reichweite von Kindern zu benutzen und aufzubewahren. Netzkabel nicht herunterhängen lassen.
- Nicht mit Luftmanschetten gehen oder laufen. Dies kann zu einem Gerätedefekt führen.
- Dem Gerät ist keine Luft zuzuführen, solange der Velcro-Verschluss offen

ist. Dies kann zu einem Gerätedefekt führen.

- Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäss gebraucht oder falsch bedient wird, kann für eventuelle Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen oder z.B. mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen.
- Reparaturen dürfen nur durch den Strack Kundendienst ausgeführt werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.



Steuereinheit



Luftschlauch



Wade/Fuss



Netzteil



Oberschenkel/
Knie/Hüfte